





V-Trak

Axxis in a box

Monteringsanvisning


Hurtig veiledning

1. Montering av festebeslag for runde rør (MB R UE)

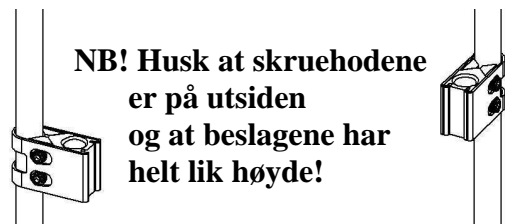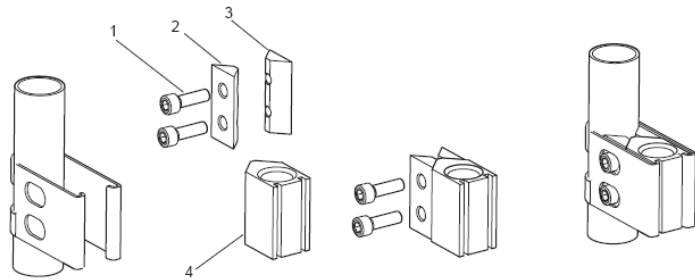


NB! Husk at skruhodene er på utsiden og at beslagene har helt lik høyde!


2. Montering av senterfestet med armer (CMA)

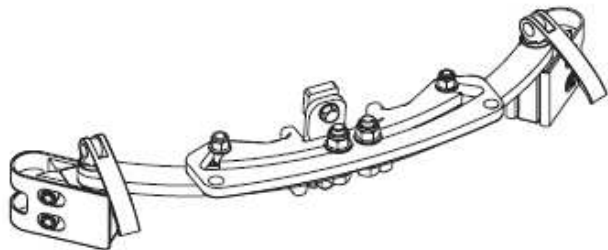

3. Montering av Axxis ryggputen

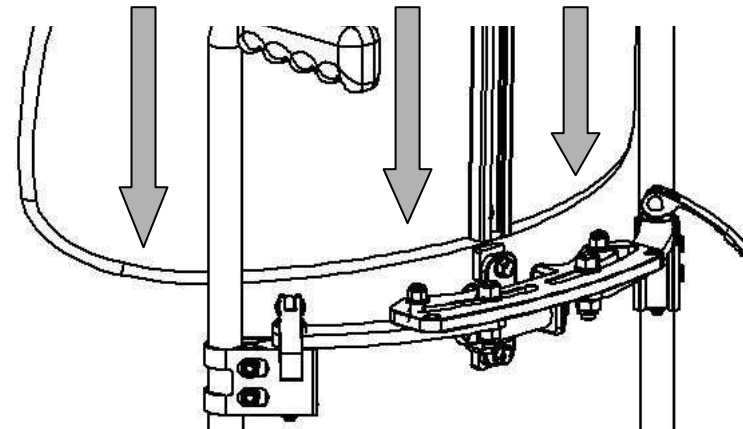

FERDIG!

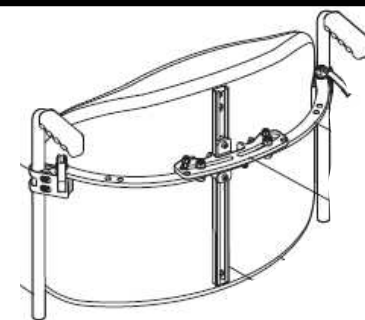

PHYSIOTECH AS

Øvre Høn terrasse 22 ♦ 1384 Asker

Tlf: 66 78 13 52 ♦ Faks: 66 78 15 52

physiotech@online.no ♦ www.physiotech.no




V-Trak

Axxis in a box

Monteringsanvisning

Hurtig veiledning

1. Montering av festebeslag for Etac

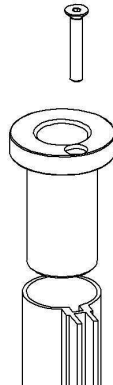


Montering av festebeslag Netti




NB! Husk at skruehodene er på utsiden og at beslagene har helt lik høyde!




2. Montering av senterfestet med armer (CMA)

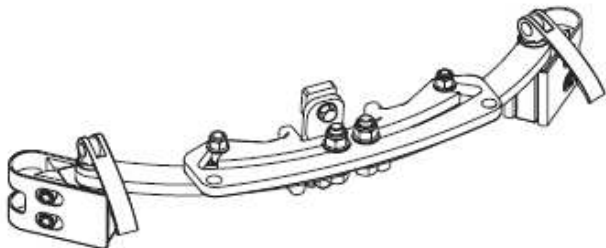

3. Montering av Axxis ryggputen

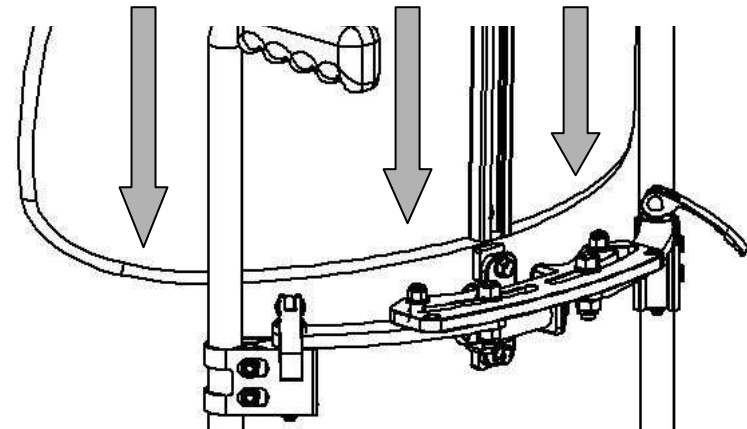

FERDIG!

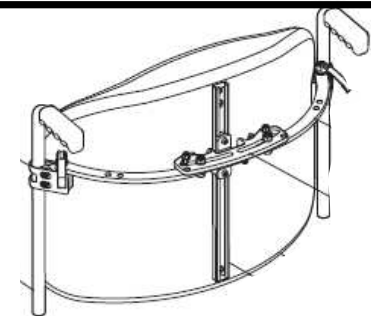

PHYSIOTECH AS

Øvre Høn terrasse 22 ♦ 1384 Asker

Tlf: 66 78 13 52 ♦ Faks: 66 78 15 52

physiotech@online.no ♦ www.physiotech.no